


## Рекомендации по применению инструмента **Трепан**

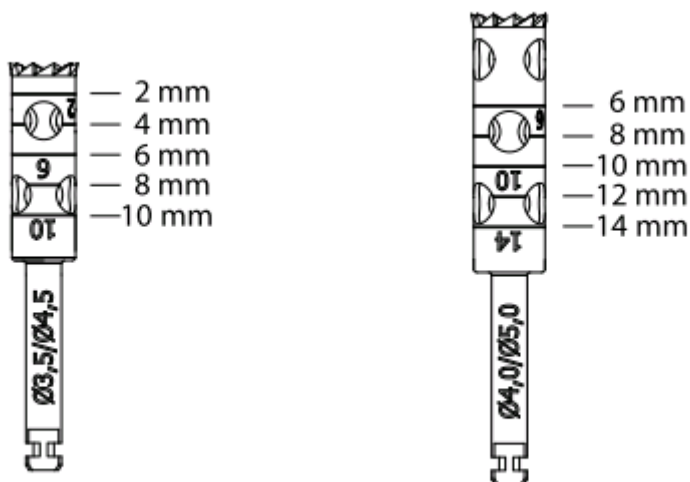

**REF RF229 - ... -RAL**

**REF RF229L - ... -RAL**

Перед и после использования следует соблюдать подробные рекомендации по обработке инструментов согласно стандартам ИСО

«DIN EN ISO 17664» [www.nti.de](http://www.nti.de)

Применять трепаны следует вначале в режиме левостороннего вращения до тех пор, пока в кости не возникнет желобок. Затем в желобке можно продолжить сверление в режиме правостороннего вращения. При этом для предотвращения повреждений нервных трактов необходимо обязательно соблюдать максимальную глубину сверления (определение по рентгенограмме). Применяя трепан, на восходящей ветви нижней челюсти следует соблюдать угол в 15°-20° к сагиттальной плоскости. После каждого использования инструменты или режущие края проверять на наличие повреждений!