

Рекомендации по применению инструмента **Tissue Trimmer**

Описание изделия:

Tissue Trimmer (триммер для слизистой) является хирургическим инструментом для работы на слизистой оболочке в полости рта. Рабочая часть (вершина) инструмента выполнена из специальной керамики.

Показание для применения:

- Раскрытие зубодесневого кармана перед снятием слепка и при парадонтологическом лечении
- Обнажение глубоко под десной расположенных кариозных полостей зуба
- Обнажение ретенированных зубов или интраоссальных имплантатов
- Папилленэктомия
- Операции по моделированию слизистой оболочки полости рта

Применение:

Tissue Trimmer должен применяться только при наличии подводки для турбинного наконечника. Рабочее число оборотов должно быть в диапазоне 300.000 – 500.000 в минуту. Более низкую скорость вращения нужно избегать, так как это может привести к повреждениям.

Водяное охлаждение:

При работе с данным инструментом водяное охлаждение должно быть отключено. При включенном водяном охлаждении нарушится коагуляция крови в капиллярах слизистой, что приведет к чрезмерной кровоточивости.

Дезинфекция:

Керамическая головка чувствительнее чем инструменты из твердых сплавов или с алмазным напылением. По этой причине нельзя будет чистить инструмент вместе с другими инструментами в ультразвуковой мойке.

Как дезинфицирующий раствор разрешается применять только допускаемые и пригодные растворы для вращающихся инструментов. Эти дезинфицирующие растворы должны отвечать соответствующим правовым предписаниям страны и должны быть допущены. Применение алкоголя не件годно для проведения достаточной дезинфекции. Образ действий во время и после дезинфекции следует предписаниям изготовителя дезинфицирующего средства.

Стерилизация:

стерилизация осуществляется в автоклаве.

Важно:

в общем процессе обработки внимательно следить за тем, чтобы головка инструмента не повреждалась. Это проверять по истечении каждой дезинфекции с помощью лупы с 10-ым увеличением.

Подробные рекомендации по обработке по DIN EN ISO 17664 www.nti.de