

## Рекомендации по применению **камня для очистки G9920**

Камень G9920 применяется для механической обработки и очистки боров, имеющих алмазное покрытие (номера изделий по каталогу G5009 - 5027; G5102 - G5123, G5161L; G5206, G5211, G5218; G5331 и G5332; а также G5113, G5114-RAи G5122).

### Применение:

Камень для очистки во время использования должен быть влажным. Для этого его перед применением замачивают в воде, пока из него не выйдут все пузырьки воздуха. Влажность блока предотвращает образование пыли при работе и заметно улучшает результат очистки. Борм, вращающимся с рабочим или более низким числом оборотов легким надавливанием быстро (около 3-5 секунд) проводят по поверхности камня для очистки.